



CrossSeat

HISO[®]
HOSPITAL SUPPLY ORGANISATION



Ein Querbett-Sessel als
Pflegeallrounder

**OPTIMALE
UND
SICHERE
SITZ-
POSITION**

CrossSeat

Für die sichere & flexible Pflege



Sichere & effiziente Mobilisation

Die Mobilisation von Personen im Querbett-Sessel bedarf der Vorbereitung auf eine Vielzahl von Eventualitäten. Die Sicherheit aber auch die Möglichkeit der effizienten Versorgung durch PflegerInnen sind dabei gleichermaßen wichtig.

Der CrossSeat von HSO ist vielseitig einsetzbar und bietet dabei das höchste Maß an Schutz für zu pflegende Personen und Anwender, da er auch in Kombination mit ThoraXsafe zur Stabilisierung oder Fixierung im Brust- oder Beckenbereich zum Einsatz kommen kann.


Der Querbett-Sessel wird mit Druckluft oder mit einer Pumpe (binnen 25 sek.) aufgepumpt. Das Produkt kann an jedem handelsüblichen Krankenhaus- oder Pflegebett – in Kombination mit den Befestigungsgurten – montiert werden. Ein Set aus 3 unterschiedlichen Gurten liegt dem CrossSeat bei. Die Luft-Füllmenge kann über das Ventil an das Gewicht und die Bedürfnisse der zu pflegenden Person angepasst werden.

Mit Hilfe eines Auslassventiles kann die Luft nach der Anwendung wieder rasch entweichen und der CrossSeat bequem – in einer Transporttasche – verstaut werden. Der Querbettssessel kann abgewaschen bzw. mit einem feuchten oder nassen Tuch aber auch mit Desinfektionsmittel einfach gereinigt werden. Die zulässigen Desinfektionsmittel entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

Bestelloptionen

Produkt	Versandeinheit	Bestell-Nr.
CrossSeat, aufblasbar, PVC	1 CrossSeat & 1 Set Befestigungsgurte (= 3 Stück)	HSOCS01
Befestigungsgurte im Set	3 Gurte	HSOCSFIX
Pumpe	1 Stück	HSOHS-318
Reparatur-Kit	1 PVC Kleber 1 PVC Streifen in 10x10cm	HSOCSKIT


So wenden Sie den CrossSeat in Kombination mit ThoraXsafe® an

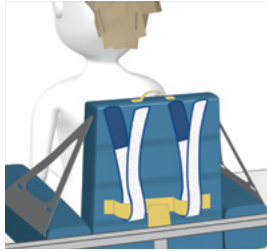

1 Beide Klettbinden anbringen

TIPP

Beide Klettbinden auf der Rückseite der Lehne des CrossSeats durch die vorgefertigten Schlaufen fädeln und fixieren.

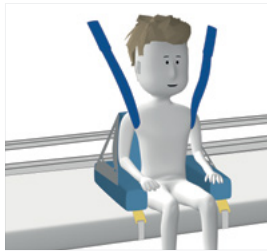

2 Fixationsgurt in Position bringen


TIPP

Fixationsgurt unterhalb der Schulterblätter anlegen und kranial unter den Achseln weiterführen.



3 Person mit Hilfe des Fixationsgurtes am CrossSeat stabilisieren

Gurt durch die Schlaufe an der oberen Seite des CrossSeats durchfädeln. Beide Enden des Fixationsgurtes hinter dem Nacken des Patienten kreuzen.

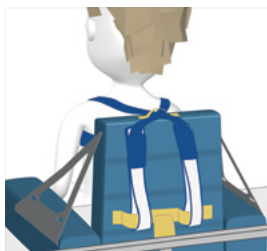

4 Enden in gewünschte Länge ziehen und an den Klettbinden befestigen

TIPP

Für bestmöglichen Halt Klettflächen soweit wie möglich ausnutzen



5 Kreuzungspunkt des Gurtes mit Sicherheitsband fixieren

TIPP

www.hso-solutions.at

Richten Sie Ihre Fragen gerne direkt
an Ihren persönlichen Produktspezialisten:



VERTRIEB

Rudolf Heintel Gesellschaft m.b.H
Erdbergstraße 166
1030 Wien, Österreich

T +43 (1) 403 89 56-0
F +43 (1) 403 89 56-50
medizintechnik@heintel.at
www.heintel.at

Foto:
© IStock Photo Click_and_Photo
© IStock Photo Anton Novik

Druck- & Satzfehler vorbehalten
Version 1.0 | Stand: Mai 2019